

URIVET50

Brochure

Bandelettes réactives pour la détermination semi-quantitative de 11 paramètres

Avantages du produit

- Lecture visuelle ou automatisée des résultats en 60-120 secondes
- 11 paramètres mesurés :
 - Glucose
 - Bilirubine
 - Corps cétoniques
 - Densité
 - Sang
 - pH
 - Protéines
 - Microalbumine
 - Créatinine
 - Nitrites
 - Leucocytes
- Les résultats ainsi fournis sont autant d'indicateurs pour diagnostiquer des problèmes métaboliques, rénaux, hépatiques, bactériologiques ou d'équilibre acido-basique.
- Possibilité de calculer les ratios Protéines/Créatinine et Microalbumine/Créatinine
- Conservation à température ambiante

Ratio Protéines/Créatinine

Ratio Microalbumine/Créatinine

Procédure d'utilisation

- 1) Immerger la bandelette dans l'urine pendant 1 seconde
- 2) Éliminer l'excès d'urine en passant la tranche de la bandelette sur le rebord du récipient et en essuyant le dos de la bandelette sur un papier absorbant
- 3) Lire les résultats après 60 secondes (sauf Leucocytes en 120 secondes) en comparant les variations de couleurs obtenues avec les différentes échelles de couleurs

URIVET 50

Reagent strips for urinalysis
Bandelettes réactives pour analyse d'urine
Tras reactivas para análisis de orina
Reagenz streifen für Urinanalyse

Tests	Results / Résultats / Resultados / Ergebnisse
Glucose/Glucose Glucose	neg. 0.500.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 mg/dl (mmol/L)
Bilirubin/Bilirubine Bilirubine	neg. 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 mg/dl (mmol/L)
Ketones/Cétone Cetones/Ketonkörper	neg. 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 mg/dl (mmol/L)
S.G./Densité Densidad/Spes.Gew.	1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060
Blood/Sang Sangre/Blut	neg. Hemoglobin 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mg/dl
pH	4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
Protein/Protéines Proteinas	neg. 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 mg/dl
Microalbumin/Microalbumine Microalbumin/Microalbumin	10 30 60 100 mg/L
Creatinin /Créatinine Creatinina/Creatinin	0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 mg/dl (mmol/L)
Nitrites/Nitrites Nitrit	neg. 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 mg/dl
Leukocytes/Leucocytes Leucocitos/Leucocytien	neg. 0 25 50 75 100 WBC/µL

Read at exactly 60 sec. (Leucocytes 90-120 sec.)
Lire après 60 sec. (Leucocytes 90-120 sec.)
Leer exactamente a los 60 seg. (Leucocitos 90-120 seg.)
Nach exakt 60 Sec. ablesen. (Leucocytien 90-120 sek.)



Référence	Désignation	Condit.
C2RDURIVET50	Bandelettes URIVET50	1x50
C2EQURIREAD	Lecteur URIREADER	1x1