

BILAN DIARRHÉE CHIEN

Brochure




Test immunochromatographique pour la détection quantitative de l'infection pouvant être responsable de diarrhée chez le chien : Parvovirus, Coronavirus ou Giardia

Données

- La Giardiose est l'une des principales causes de diarrhées chez les chiens. C'est un protozaire infectant l'intestin grêle. Ce pathogène se fixe aux microvillosités épithéliales de l'intestin et se multiplie par division binaire. Les chiots sont particulièrement touchés, notamment lorsqu'ils vivent en groupes (chenils...).
- Le CPV (Parvovirus canin) et le CCV (Coronavirus canin) provoquent des vomissements et des diarrhées chez le chien. Dans plus de 25 % des suspicions d'infection par le CPV, il s'agit en réalité d'une infection par ces 2 virus. Elles s'avèrent souvent fatales pour l'animal.
- Les symptômes de l'infection par Giardia, CCV et CPV étant très semblables (diarrhées), il n'est pas facile de les différencier.
- Le test Bilan diarrhée vous aide à y parvenir : les anticorps de Parvovirus, Coronavirus, ou Giardia sont spécialement sélectionnés et utilisés dans chaque bande de test. Ceux-ci permettent au Bilan diarrhée d'identifier l'antigène Parvovirus, ou Coronavirus, ou encore Giardia dans les selles avec un degré de précision élevé.


Avantages du produit

- Migration rapide : résultats en moins de 10 minutes
- Procédure de test simplifiée : facile et rapide
- Échantillon : selles
- Interprétation objective du résultat
- Conservation à température ambiante
- Aucun matériel supplémentaire requis

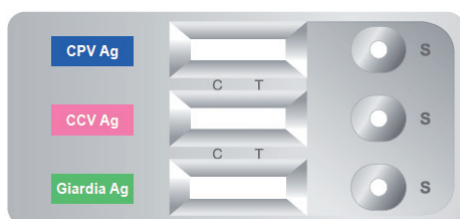

Pathologie	Méthode de référence	Sensibilité	Spécificité
Parvovirus	PCR	100%	98,8%
Coronavirus	PCR	93,1%	97,5%
Giardia	Microscopie électronique	100%	100%


Procédure d'utilisation

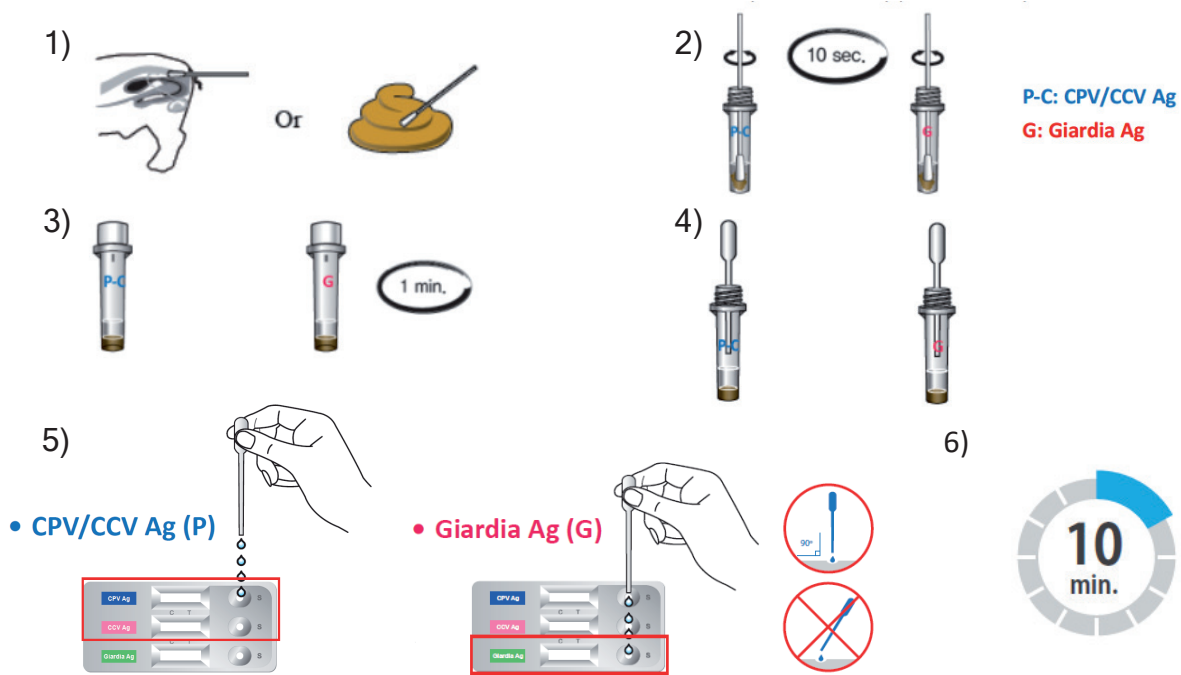

Interprétation des résultats

- Une bande de couleur apparaît dans la section gauche de la fenêtre de résultat pour montrer que le test fonctionne correctement. Il s'agit de la barre de contrôle.
- La section droite de la fenêtre indique les résultats du test.
- Si une autre bande de couleur apparaît dans la section droite de la fenêtre de résultat, alors le résultat est positif.

CPV Ag positif

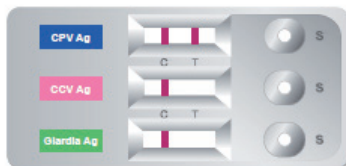

CCV Ag positif



Giardia Ag positif



CPV, CCV et Giardia négatifs



Référence	Désignation	Condit.
B7TRRG1112U	Test rapide Bilan Diarrhée Chien	1x1
B7TRRG1112	Test rapide Bilan Diarrhée Chien	1x10