



STERIHEEL+

Un volume de sang suffisant pour une profondeur d'incision minimale

Prélèvement de sang capillaire par incision au talon

Avantages du produit

- Sécurité de l'utilisateur : la lame est entièrement protégée avant et après utilisation; bouton d'activation garanti par cran de sûreté.
- Sécurité du patient : à usage unique; stérilisation par rayons gamma.
- Profondeur de pénétration standardisée.
- Pas de gâchette détachable : aucun risque d'ingestion par le nouveau-né !
- Confort du patient : lame ultra tranchante avec action à grande vitesse assurant une absence de traumatisme et une cicatrisation rapide.
- Débit sanguin élevé : le mouvement contrôlé de la lame est conçu pour optimiser le flux sanguin.
- AUCUNE DOULEUR POUR LE BÉBÉ !



Micro-Prématurés (< 1 kgs)
Profondeur d'incision : 0,65mm
Longueur d'entaille : 1,40mm



Prématurés (>1 kgs / < 2,5 kgs)
Profondeur d'incision : 0,85mm
Longueur d'entaille : 1,75mm




Bébés à terme (> 2,5 kgs / < 4 kgs)
Profondeur d'incision : 1,00mm
Longueur d'entaille : 2,50mm



Bébés à terme + (> 4 kgs)
Profondeur d'incision : 1,14mm
Longueur d'entaille : 2,80mm

Procédure d'utilisation

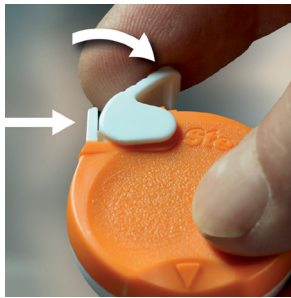

1. Baisser la gâchette de sécurité (blanche)
Pas de gâchette détachable : aucun risque d'ingestion par le nouveau-né !



2. Désinfecter la zone de prélèvement.
Position de référence pour le prélèvement sanguin au talon du nourrisson



3. Appuyer fermement l'appareil contre le talon du nourrisson et libérer la lancette (appuyer sur touche blanche)



4. Collecter l'échantillon de sang avec un tube capillaire



5. Jeter la lancette dans un conteneur de sécurité approprié

Référence	Désignation	Condit.
V2335213	Steriheel Micro-prématurés (vert)	1x50
V2334213	Steriheel Prématurés (orange)	1x50
V2333213	Steriheel Bébés à terme (jaune)	1x50
V2332213	Steriheel Bébés à terme + (rose)	1x50