



ENCEPH

Diagnostic d'exclusion chez le lapin

Test immunochromatographique permettant de détecter les anticorps IGG contre Encephalitozoon cuniculi chez le lapin



Résultat en
10 minutes



Stockage à
temp. ambiante



10µl de Sérum/
Plasma
20µl de Sang
total



Péremptions
longues



Quand utiliser le test ?

- En cas de suspicion clinique (tête penchée, ataxie, convulsions, problèmes rénaux)
- Contrôle de routine en cas d'anomalies neurologiques – *diagnostic d'exclusion*
 - Otite moyenne / interne (complexe de la fièvre du lapin)
 - Otite externe (*Psoroptes cuniculi*)
 - Traumatismes, toxoplasmose, néoplasie, infection herpétique, intoxication
- Identification des porteurs asymptomatiques (zoonose)

Procédure de test simple



fig.2



fig.3


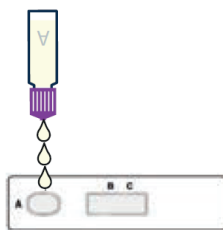



fig.4



Interprétation des résultats

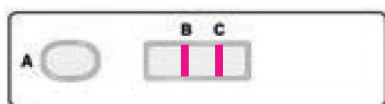

Positif

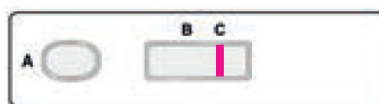

Négatif

L'encéphalitozoonose du lapin

- Il s'agit d'une maladie neurologique d'origine parasitaire, l'*Encephalitozoon cuniculi*. Les lapins (domestiques) sont les principaux animaux touchés. Bien que très rare, cette infection peut toucher les personnes immunodéprimées (zoonose).
- Des symptômes neurologiques, des signes d'insuffisance rénale et une inflammation de la peau autour des yeux peuvent apparaître en raison de lésions au niveau du système nerveux central, des reins et des yeux. Les lapins malades peuvent présenter un ou plusieurs de ces symptômes. Le plus courant est ce qu'on appelle le syndrome vestibulaire (tête penchée, troubles de la coordination des mouvements et tremblements oculaires). D'autres symptômes neurologiques peuvent inclure des convulsions, une paralysie partielle et une perte d'équilibre. Dans de rares cas, une agressivité accrue et une perte de l'ouïe ou de la vue peuvent également se produire. Chez certains animaux, une insuffisance rénale accompagnée de symptômes plutôt non spécifiques (perte d'appétit ou de poids, déshydratation, troubles de l'équilibre minéral et du métabolisme osseux ainsi qu'apathie) peut être révélatrice.
- Le diagnostic *in vivo* de l'encéphalitozoonose chez les lapins est problématique en raison du grand nombre d'animaux présentant une infection chronique asymptomatique car les anticorps peuvent être détectés dans le sang pendant des années. Un résultat négatif permet donc d'exclure un diagnostic pathologique.

Référence	Désignation	Condit.
M5825006RK1	Test rapide ENCEPH	1x6

KITVIA SAS

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France



KITVIA
www.kitvia.com