

# URIVET100

## L'analyse d'urine rapide à la clinique

*Bandelettes réactives semi-quantitatives 10 paramètres*



Résultats en  
60 secondes



Fiable et  
rapide



Stockage à  
temp. ambiante



Multi-espèces



Bilirubine

Corps  
cétoniques

Densité

Glucose

Leucocytes

Nitrites


pH

Protéines

Sang

Urobilinogène

## Procédure d'utilisation

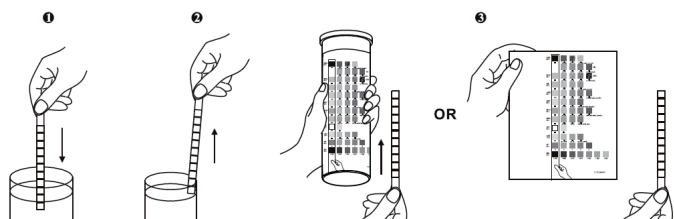

1. Immerger la bandelette dans l'urine pendant 1 seconde
2. Éliminer l'excès d'urine en passant la tranche de la bandelette sur le rebord du récipient et en essuyant le dos de la bandelette sur un papier absorbant
3. Lire les résultats après 60 secondes en comparant les variations de couleurs obtenues avec les différentes échelles de couleurs

Référence

Désignation

Condit.

A2U033103

KTV Band. URIVET100

1x100

**KITVIA SAS**

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

**KITVIA**  
www.kitvia.com