

OVUCHECK PREMATE

Brochure



Test semi-quantitatif de dosage de progestérone dans le sang (plasma ou sérum) chez la chienne

Données

La prospérité d'un élevage dépend énormément de la réussite des saillies et ne pas identifier correctement cette période est la cause principale d'infertilité chez la chienne.

Les critères subjectifs utilisés traditionnellement (aspect des écoulements vaginaux, nombre de jours après le début des saignements vaginaux, acceptation du mâle) ne sont pas toujours fiables.

De plus, au moins un tiers des chiennes ne présentent pas un cycle identique en période de chaleur, c'est-à-dire qu'elles peuvent être fécondables à une date bien différente d'un cycle à l'autre.

Le suivi du niveau sérique de progestérone permet de préciser le moment optimal de fécondité de la femelle.

D'exécution simple et rapide, Ovucheck PREMATE© permet de déterminer, par une mesure semi-quantitative, le moment idéal de la saillie.

Effectuer la saillie au bon moment c'est l'assurance d'une meilleure fertilité et d'une prolificité accrue.

POURQUOI DOSER LA PROGESTÉRONE ?


- Parce que les frottis vaginaux, bien que simples à réaliser, ne donnent pas toujours un reflet exact de la période du cycle sexuel
- Parce que le dosage de la progestérone est reconnu comme l'indicateur fiable du moment de la saillie

Avantages du produit







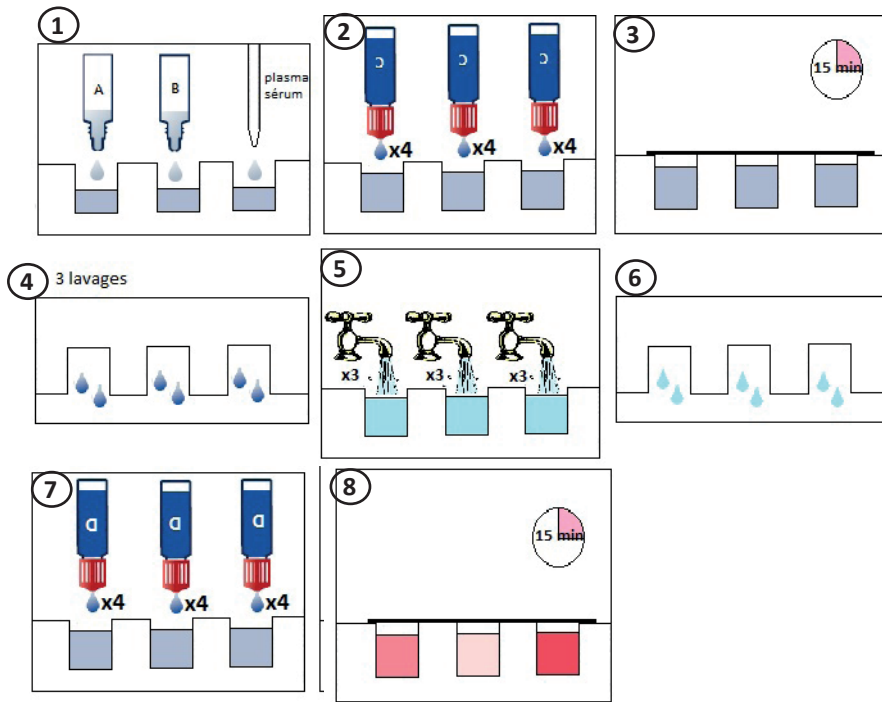








- Objectifs du test :
 - augmenter le succès de reproduction
 - augmenter le taux de prolificité des portées
 - déterminer avec plus de précision la date d'échéance de mise bas
 - réduire les déplacements inutiles dans le cas de la reproduction infructueux
- Test semi-quantitatif
- Méthode ELISA de compétition
- Exécution rapide : résultats en 35 minutes
- Nombre de tests par kit : 5 ou 10 tests

Sensibilité	Spécificité
100%	95,5%

Procédure d'utilisation



Interprétation des résultats

APPLI- CATIONS	A B Éch.	A B Éch.	A B Éch.	A B Éch.	A B Éch.
	  	  	  	  	  
	L'échantillon est plus rose que le A (étalon bas). La concentration en progestérone est inférieure à celle de l'étalon bas (3 ng/mL).	L'échantillon est aussi rose que A (étalon bas). La concentration en progestérone est autour de 3 ng/mL.	L'échantillon est plus pâle que l'étalon A mais plus foncé que l'étalon B. La concentration en progestérone est entre 3 et 10 ng/mL.	L'échantillon est identique à B (étalon fort). La concentration en progestérone est autour de 10 ng/mL.	L'échantillon est plus clair que B («talon fort»). La concentration en progestérone est supérieure à 10 ng/mL.
SUIVI DES CHALEURS	La chienne est en phase de pro-oestrus. Tester à nouveau dans 2 jours.	La chienne est en phase de pro-oestrus. Tester à nouveau dans 2 jours.	L'ovulation est imminente. Renouveler le test 1 jour plus tard.	La chienne vient d'ovuler. Une période de 2 à 3 jours est alors nécessaire pour que l'ovule termine sa maturation. Du fait de la survie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la chienne, procéder à l'accouplement dans 1 ou 2 jours.	La chienne a ovulé. Procéder sans délai à l'accouplement.
DETECTION DU TERME	La chienne est probablement à terme et devrait mettre bas dans les 12 à 24 heures.	En principe, la chienne ne devrait pas mettre bas dans les 24 prochaines heures. Renouveler le test 1 jour plus tard.	La chienne n'est pas à terme. En principe, elle ne doit pas mettre bas avant 48 heures. Tester à nouveau dans 2 jours.		
ANOES- TRUS PROLONGE	La chienne ne sécrète pas de progestérone. Deux hypothèses sont possibles: elle n'a pas ovulé, ou elle n'a pas été en chaleur dans les 2 mois précédents.	La chienne sécrète de la progestérone. Les chaleurs sont probablement passées inaperçues ou la chienne présente une pathologie ovarienne. Renouveler le test dans un mois afin de documenter la durée de l'augmentation de progestérone.			

Référence	Désignation	Condit.
B8RDTRM541	Ovucheck PREMATE Visuel Canin	1x5
B8RDTRM540	Ovucheck PREMATE Visuel Canin	1x10