

URIVET100

Brochure


Bandelettes réactives pour la détermination semi-quantitative de 10 paramètres

Avantages du produit

- Lecture visuelle ou automatisée des résultats en 60 secondes
- 10 paramètres mesurés :
 - Glucose
 - Bilirubine
 - Corps cétoniques
 - Densité
 - Sang
 - pH
 - Protéines
 - Urobilinogène
 - Nitrites
 - Leucocytes
- Les résultats ainsi fournis sont autant d'indicateurs pour diagnostiquer des problèmes métaboliques, rénaux, hépatiques, bactériologiques ou d'équilibre acido-basique.
- Les pads réactifs sont recouverts d'un film plastique absorbant («Mesh») qui évite tout phénomène de débordement de l'échantillon d'urine d'une zone réactive vers l'autre
- Le bouchon du flacon intègre un dispositif d'absorption de l'humidité offrant une conservation optimale des bandelettes réactives
- Conservation à température ambiante

Procédure d'utilisation

- 1) Immerger la bandelette dans l'urine pendant 1 seconde
- 2) Éliminer l'excès d'urine en passant la tranche de la bandelette sur le rebord du récipient et en essuyant le dos de la bandelette sur un papier absorbant
- 3) Lire les résultats après 60 secondes en comparant les variations de couleurs obtenues avec les différentes échelles de couleurs

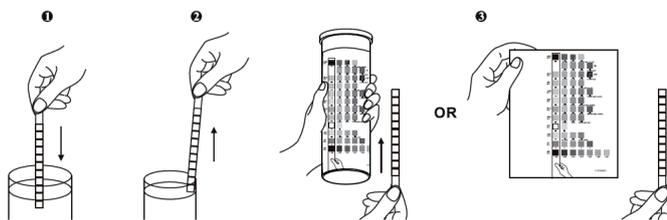

Référence	Désignation	Condit.
A2RDU033103OB	Bandelettes URIVET100	1x100

