

VACCICHECK

Brochure



Technique ELISA manuelle permettant de mesurer les titres d'anticorps des chiens et des chats par rapport aux principaux vaccins utilisés sur ces espèces

Anticorps titrés



- Hépatite de Rubarth ou Adénovirus (ICH)
- Parvovirose (CPV)
- Distemper ou Maladie de Carré (CDV)



- Panleucopénie (FPV)
- Herpès Virus (FHV)
- Calici Virus (FCV)

Données

- Le Vaccicheck présente ainsi un certain nombre d'applications ayant fait leurs preuves.
- Le WSAVA (organisation mondiale de la santé des animaux de compagnie) a récemment insisté sur la nécessité de contrôler l'immunité des chiens et des chats, et de ne revacciner les animaux de compagnie que lorsque cela est nécessaire.
- Les différentes recommandations sont vérifiables sur le site du WSAVA : www.wsava.org/guidelines/vaccination-guidelines.
- En France, de plus en plus de vétérinaires font appel au Vaccicheck pour effectuer les contrôles immunitaires, et de plus en plus d'articles dans la littérature professionnelle mettent en avant la nécessité de vérifier régulièrement l'immunité acquise avant de procéder à des survaccinations systématiques.


Quand utiliser VACCICHECK ?

- Contrôle de la nécessité d'une vaccination additionnelle
- Contrôle de l'efficacité de la vaccination
- Contrôle des chenils, élevages et refuges
- Contrôle sur un animal recueilli

Procédure d'utilisation


Le test (peigne)

- Le peigne est sécable et contient 12 tigettes réactives que l'on peut analyser selon le besoin : il est possible à partir d'un échantillon de n'utiliser qu'une seule tigette.
- Chaque tigette comporte une combinaison de 3 tests différenciés exemple: sérologies FPV, FCV et FHV pour le Vaccicheck Chat
- Sang total ou sérum

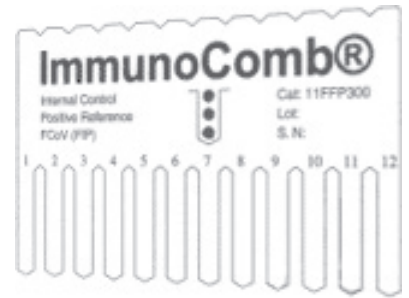


La cassette de développement

La cassette de développement est un ensemble de plusieurs compartiments prêts à l'emploi, qui contiennent déjà tous les réactifs nécessaires pour l'analyse.

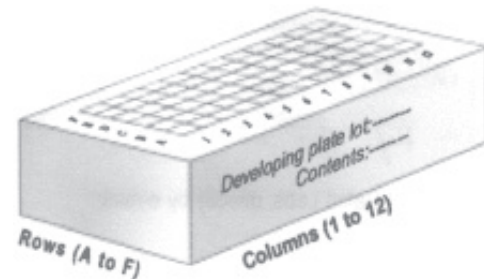


1
Prélever le sang de l'animal.

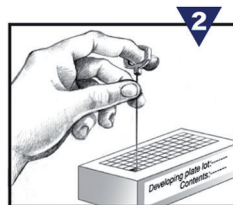


2
Déposer le sang ou le sérum dans le(s) puits A de la cassette de développement.



3
Insérer le peigne dans le(s) puits A. Incuber pendant la durée spécifiée.

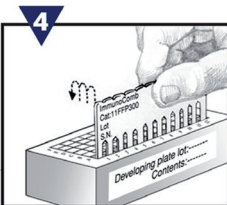

4
Transférer le peigne du puits A jusqu'au puits F selon un intervalle de temps qui varie en fonction du type de kit.

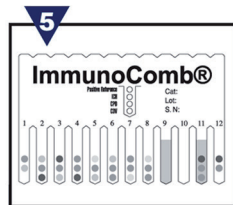

5
Laisser le peigne sécher et lire le résultat. L'intensité de la couleur des points sur le peigne correspond au titre d'anticorps présent dans l'échantillon.

Lors de la commande d'un premier coffret, nos équipes techniques se tiennent à la disposition des vétérinaires qui en font la demande pour venir former le personnel de la clinique à l'utilisation du kit.

Référence	Désignation	Condit.
B2IEM50FVV101	VACCICHECK Chat	1x12
B2IEM50CVV101	VACCICHECK Chien	1x12